

POWDERCRUSH



Triturar a medicação, tão fácil como 1,2,3



1. Coloque o medicamento para ser esmagado numa das Saqueta de medicação descartáveis PowderPouches - GMR PLUS

Dobrar sobre a parte superior da bolsa para manter o pó no interior da Saqueta



2. Com uma mão, insira a Saqueta de medicação descartável PowderPouches - GMR PLUS cheio de comprimidos na ranhura na parte superior da máquina. Pressione para baixo o botão de arranque para esmagar os medicamentos.



3. Normalmente, 4-5 segundos irá produzir os resultados desejados. Para um pó mais fino operar por um período mais longo.

Especificações

O sistema é usado com **Powdercrush** PowderPouches saquetas de medicação descartáveis disponíveis através da GMR PLUS. O **Powdercrush** é totalmente recarregável usando baterias de íons de lítio

Largura: 8,25 centímetros (3,25 in)

Comprimento: 27,9 centímetros (10,98 in)

Altura: 9,5 centímetros (3,74 in)

Peso: 2,7 kg

